

## Elektronische Sitzwaage mit LCD-Display

### Wartung und allgemeine Pflege:

- Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten nur von qualifizierten Servicekräften ausgeführt werden.
- In der Waage selbst befinden sich keine vom Nutzer wartbaren Teile.
- Die Netzsicherungen sind nicht zugänglich.
- Wenn der Adapter ans Netz angeschlossen wird, sollte eine grüne LED für die korrekte Funktion des Adapters aufleuchten. Leuchtet die LED nicht auf, sollte die Waage von qualifiziertem Personal geprüft werden.
- Die Gewichtsanzeige enthält einen internen, wiederaufladbaren Batteriesatz. Dieser sollte von qualifizierten Servicekräften ausgetauscht werden. Unter normalen Betriebsbedingungen sollten die Batterien mehrere Jahre lang halten.
- Wir empfehlen, die Waage mit alkoholbasierten Reinigungstüchern oder ähnlichem zu reinigen.
- Bitte verwenden Sie keine großen Mengen von Wasser, wenn Sie die Waage reinigen, da dies deren Elektronik beschädigen könnte. Sie sollten auch keine aggressiven Flüssigkeiten oder Hochdruckreiniger verwenden.
- Trennen Sie die Waage vor der Reinigung stets von der Netzstromversorgung.

### Technische Daten:

Modell:	Marsden M-200
Genauigkeitsklasse:	Klasse III
Wiegekapazität:	150 kg / 250 kg
Anzeigensprung:	50 g / 100 g
Batterietyp:	7,2 V / 2.000 mah
Netzadapter:	12 V / 2 A
Gewicht des Geräts:	28 kg

### Bei Fragen zum Produkt sprechen Sie uns einfach an:

Telefon 0 21 52 / 8 92 54 48  
service@bundw-service.de

