

  **wissner-**
  **bosserhoff**

Funktionale Eleganz in der Pflege

sentida 1-6

Niedrigpflegebetten





sentida – universelle Niedrigpflegebetten

Keine Kompromisse: Sicherheit und Wohlbefinden in Perfektion

Stürze stellen eine der größten Gefahren für die körperliche Gesundheit sowie das psychische Wohlergehen älterer Menschen dar. Eine systematische Sturzprävention spielt daher in der Altenpflege eine entscheidende Rolle und ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Pflegeeinrichtungen. Die gesundheitlichen Konsequenzen, die sich aus Stürzen ergeben, sind gerade bei älteren Menschen häufig gravierend und schlimmstenfalls irreversibel.

Die Angst vor weiteren Stürzen ist eine der häufigsten psychischen Folgen, die zu eingeschränkter körperlicher Aktivität, einem Verlust an Selbstvertrauen und zu sozialer Isolation führen kann. Mit den Niedrigpflegebetten aus der sentida Reihe ist wissner-bosserhoff eine konsequente und vor allem kompromisslose Umsetzung der Ansprüche an eine zeitgemäße Pflege gelungen: Größtmögliche Sicherheit in Kombination mit einem wohnlichen Design. Innovative Lösungen wie der einzigartigen 3-Stopp-Strategie und dem patentierten SafeFree®-Seitensicherungskonzept reduzieren Stürze und ihre Folgen und setzen Maßstäbe in puncto Sicherheit, Mobilität, Höhenverstellbarkeit und Wohnlichkeit.

5

Millionen
Stürze älterer
Menschen pro Jahr:

Fast ein Drittel der 65-Jährigen und Älteren sowie die Hälfte der 80-Jährigen und Älteren stürzen jährlich mindestens einmal. Allein in Deutschland kommt es zu rund 5 Millionen Stürzen älterer Menschen pro Jahr.

(Quelle: Gesundheit und Krankheit im Alter.
Herausgeber: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/
Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/
Thomas Ziese, Robert Koch-Institut, Berlin 2009)



Prävention mit
sentida
Niedrigpflegebetten

für den Einsatz
in Einrichtungen mit einem
hohen Anspruch an universelle
und bodennahe Pflege:
Alten- und Pflegeheimen,
Pflegeoasen, Palliativstationen,
Demenz- und Geriatriestationen
und Rehabilitations-
einrichtungen.

Die sentida Wohnidee



Material- und Farbauswahl greifen den aktuellen, natürlichen Wohntrend auf. So entsteht eine wohnliche, warme Atmosphäre, in der sich Bewohner aufgehoben und geborgen fühlen.



Niedrigpflegebett sentida 5 im Design D10



Nachttisch vivo E2



Sessel belsedia
Komfort 609



Dekor Lindberg Eiche

Die sentida Vorteile

01

Patentiertes SafeFree®-Seitensicherungskonzept

Oft nachgeahmt, nie erreicht – unser Beitrag für weniger Fixierung im Sinne des Werdenfelser Wegs** und des Redufix***-Projektes

- Geteilte Seitensicherung, jeweils in 4 Höhen einstellbar
- Kein Mittelposten, keine gefährliche Mittellücke

02

3-Stopp-Strategie*

zur Höhenverstellung:

- Sturzprävention in der Schlafphase bei 27 cm Betthöhe
- Sichere Mobilisation auf Stuhlhöhe bei 41 cm Betthöhe
- Optimale Pflegeposition bei 80 cm Betthöhe


03

BiNetic-Liegefläche

mit doppeltem Rückzug:

Echte Dekubitusprävention - mehr als nur eine sogenannte DBfK-Rückenlehne

- Ihr Plus: Reduktion der Beckenkompression sowie der Reibungs- und Scherkräfte durch Beinlehnen-Rückzug um 6 cm
- Rückenlehnenrückzug um 11 cm

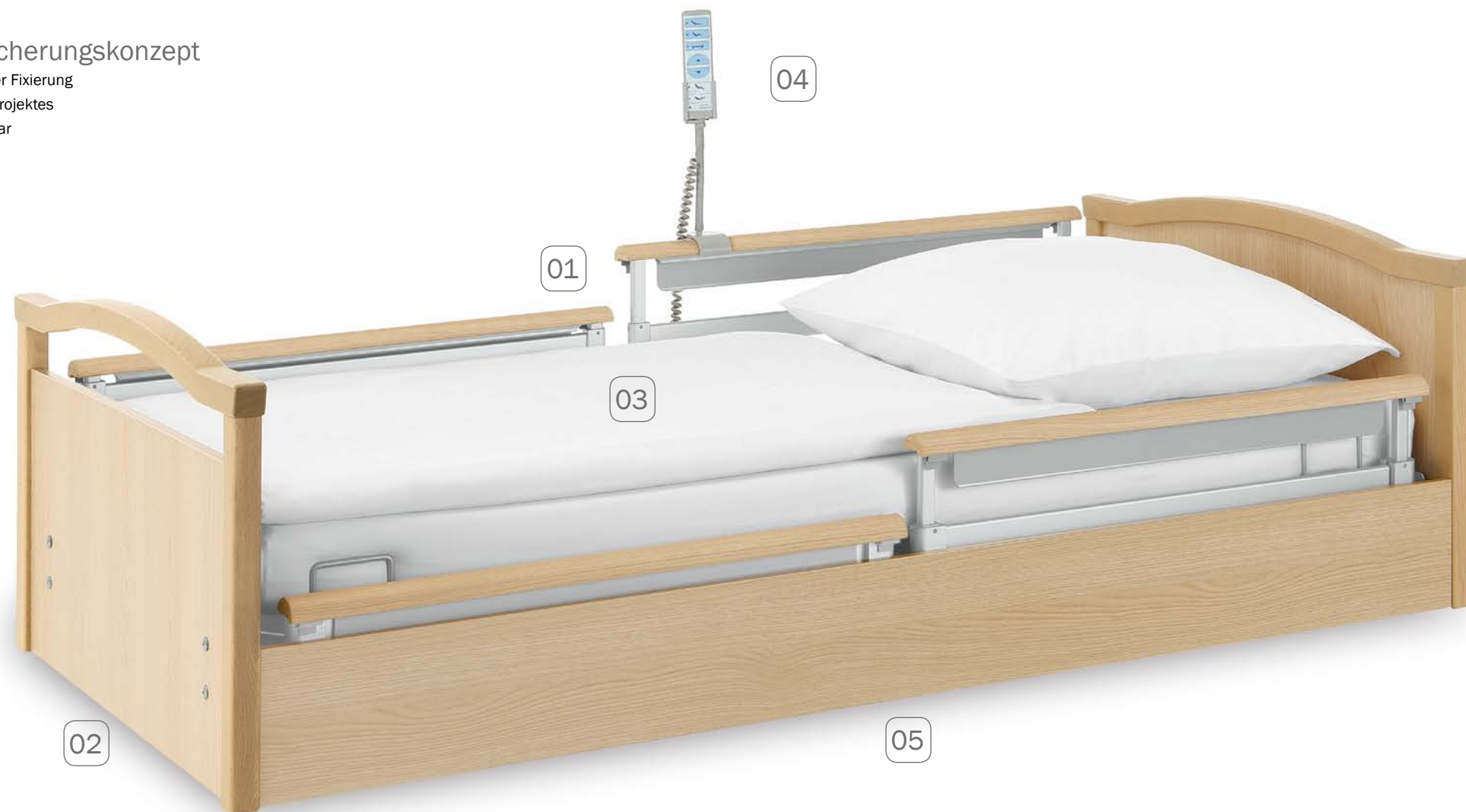

04

Design-Handscher

Verbesserte und erweiterte Funktionalität

- 3 Sicherheitsstufen einstellbar: Pflege, Bewohner- und Sicherheitsmodus
- 2 Automatikpositionen: Komfortsitz- und Prophylaxe-Automatik
- Mobilisierungsfunktion
- Nachlichtsteuerung
- Separate Beinlehnenverstellung
- Spielschutz

05

Nachtlichtfunktion

Optional kann ein Nachtlicht integriert werden

- Erleichterung der Orientierung bei Nacht
- Mehr Sicherheit für den Bewohner
- Leichte Netzanschlusskontrolle
- Steuerung per Handschalter

* Die Höhenangaben der 3-Stopp-Strategie gelten für sentida 5 und sentida 6 mit 100 mm Laufrollen.
** Infos erhalten Sie z.B. unter: www.leitlinie-fem.de/werdenfelser-weg/materialien/ *** www.redufix.de

Das sentida Portfolio

sentida 1
Das Einsteigermodell



Fahrbarkeit
In Niedrigposition

Rollen
Fußseitig zwei Standfüße
Kopfseitig zwei 100 mm
Bockrollen



Bremsbarkeit
Elektrische Bremse per Handschalter

Höhenverstellung
25-80 cm

sentida 3
Das Mobile



In jeder Betthöhe

Fußseitig vier 50 oder 75 mm
Doppelaufrollen
Kopfseitig zwei 100 oder 160 mm
Bockrollen



Elektrische Bremse per Handschalter
Bremsbügel fußseitig

25-80 cm

sentida 4
Das Flexible



In jeder Betthöhe

50 oder 75 mm Doppelaufrollen



Elektrische Bremse per Handschalter
Bremsbügel kopf- und fußseitig

25-80 cm

sentida 5
Das Wohnliche



In jeder Betthöhe

50 mm Doppelaufrollen
vollständig durch wohnliches Chassis
verkleidet



Achswise Pedalbremse
mit 2-Rollen-Zentralfeststellung

27-80 cm

sentida 6
Das Extramobile



In jeder Betthöhe

100, 125 oder 150 mm Leichtlaufrollen
oder 125 mm Doppellauf- bzw. Designrollen



Bremsbügel fußseitig
mit 4-Rollen-Zentralfeststellung

27-80 cm mit 100 mm Leichtlaufrollen
29,5-82,5 cm mit 125 mm Leichtlaufrollen
28-81 cm mit 125 mm Doppellauf- /Designrollen
32-85 cm mit 150 mm Leichtlaufrollen


sentida 7-i
Das Intelligente



Für weitere Informationen empfehlen wir unseren sentida 7-i Katalog.



sentida Einrichtungsbeispiele

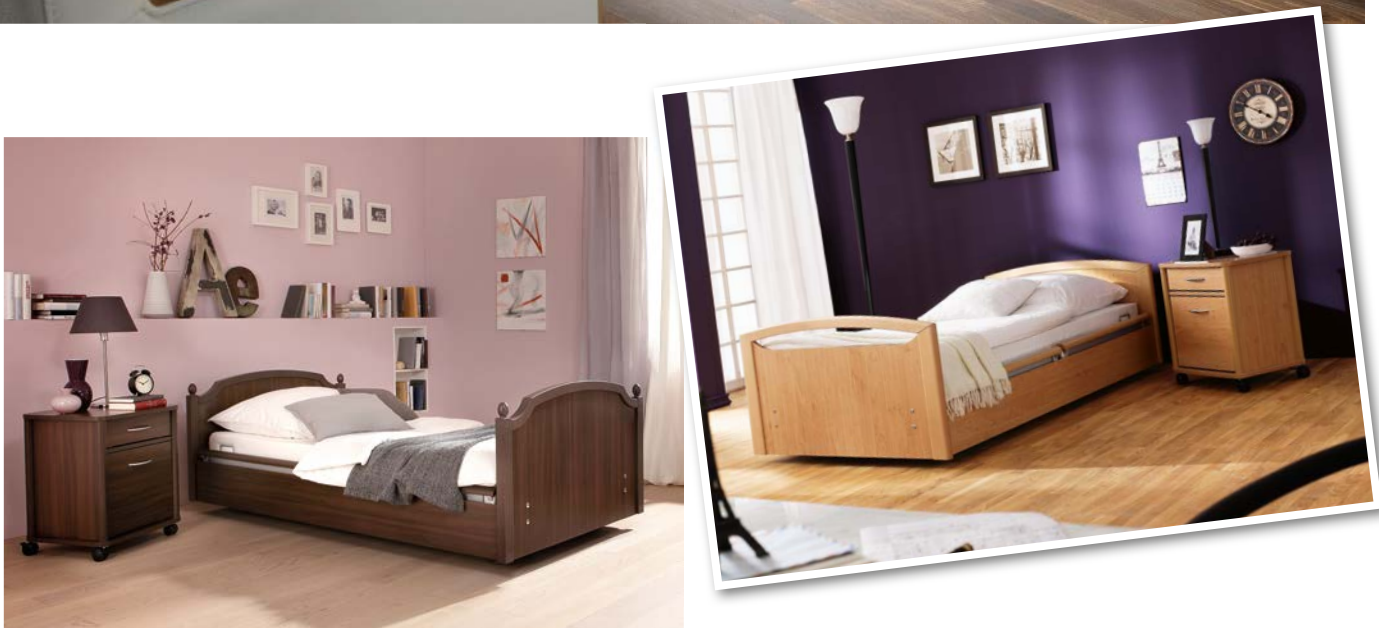


BiNetic-Liegefläche


Liegeflächen-Ergonomie

Die ergonomische Aufteilung der Liegefläche trägt zur Vermeidung von Druckbelastungen und damit zur Dekubitusreduzierung bei. Die Maße der 4-geteilten Liegefläche von wissner-bosserhoff Pflegebetten orientieren sich an den Erkenntnissen der Anthropometrie, d.h. an der durchschnittlichen Körpergröße eines Menschen. Auf Basis der Erkenntnisse von Prof. Eigler wird ersichtlich, dass der Rückenlehnenbereich zur wirksamen Unterstützung der Hals-


wirbelsäule mindestens 80 cm lang sein sollte. Eine zusätzliche Reduzierung von Druckbelastungen erreicht die BiNetic-Liegefläche bei überdurchschnittlich großen Bewohnern durch seine integrierte Bettverlängerung: Mit der werkzeuglosen Express-Bettverlängerung kann die Liegefläche temporär oder mit Verlängerungseinsatz auch permanent auf 220 cm verlängert werden und verhindert so ein Anstoßen der Beine am Fußteil.

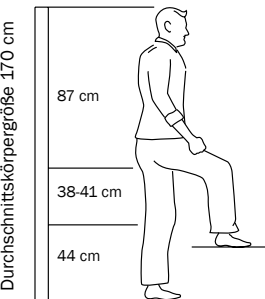

Anthropometrie nach Prof. Eigler*

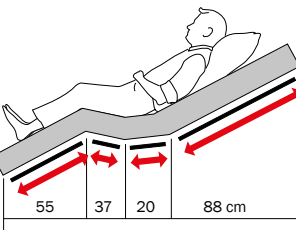

BiNetic-Liegefläche 200 cm (lange Rückenlehne)

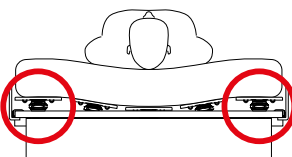


Komfortliegefläche mit 55 Federelementen

Liegeflächen-Modularität

Sie haben 3 verschiedene Liegeflächen zur Auswahl:

- 01 Die Drahtgitterliegefläche **Aero** sorgt für eine gute Durchlüftung.
- 02 Die Kunststoffauflagen der **EasyClean-Liegefläche** sind besonders leicht zu reinigen.
- 03 Die **Komfort-Liegefläche** mit ihren 55 Federelementen fördert nicht nur den Liegekomfort, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur Dekubitusprävention.

Generell sind die Liegeflächenpartitionen leicht zu reinigen und entnehmbar.

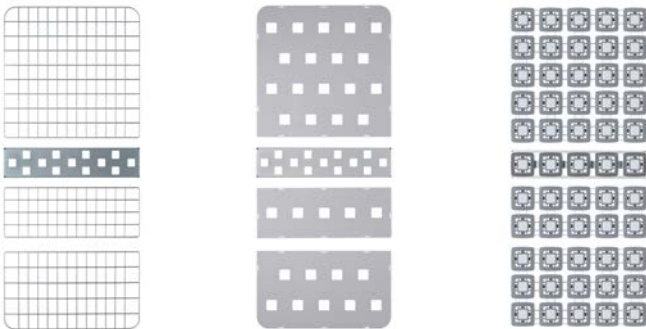

01

02

03



Detail Komfort-Liegefläche


mit doppeltem Rückzug

Wirkung des doppelten Rückzugs nachgewiesen

wissner-bosserhoff verfolgt bereits seit vielen Jahren ein praktikables Konzept zur Reduzierung des Dekubitusrisikos: Den doppelten Rückzug als Bestandteil der BiNetic-Liegefläche. Beim doppelten Rückzug wird nicht nur die Rückenlehne sondern auch die Beinlehne vom Sitzteil weg bewegt, so dass sich die Fläche vergrößert.


Inzwischen liegen auch Ergebnisse von Druckmessungen vor, aus denen deutlich zu erkennen ist, dass der Druckbelastung beim doppelten Rückzug (Abb. 1b) niedriger ist als beim einfachen Rückzug und deutlich niedriger ist als bei einer Standardliegefläche (Abb. 2b).

Doppelter Rückzug

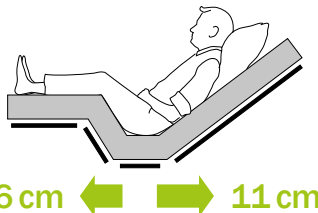


1a) BiNetic-Liegefläche mit doppeltem Rückzug

Kein Rückzug

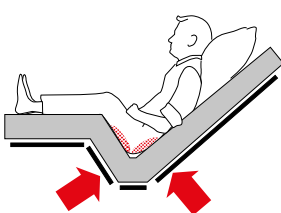


2a) Gewöhnliche Standardliegefläche

BiNetic-Liegefläche

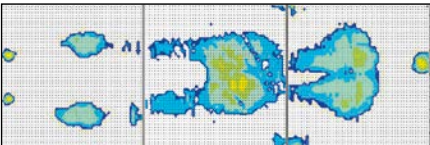

1b) mit BiNetic-Liegefläche mit doppeltem Rückzug

Standard-Liegefläche

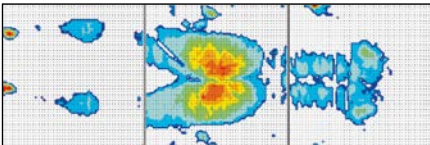

2b) mit Standardliegefläche

Der doppelte Rückzug ist nicht als alleinige Dekubitusprophylaxe zu sehen; er kann aber die vorhandenen Möglichkeiten gut unterstützen und zeigt vor allem, dass wir heute alle uns

zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten einsetzen sollten, um die Prävention zu verbessern.

Bis zu
1,5
Millionen

Menschen leiden an Dekubitus: Allein in Deutschland geht man von ca. 750.000 bis 1,5 Millionen Dekubitus-Patienten aus. Vor allem immobile, kranke und ältere Menschen sind betroffen. Die Kosten zur Behandlung des Dekubitus in Deutschland betragen jährlich 1 bis 4 Milliarden Euro. Aufgrund der steigenden Bevölkerungsalterung sowie der Zunahme chronischer Erkrankungen werden die Fälle von Dekubitus Erkrankungen weiter zunehmen. Gemäß dem Gesundheitsbericht des Bundes (Heft 12, Dekubitus, Dezember 2002) können durch entsprechende Prophylaxemaßnahmen und eine optimierte Therapie die Hälfte dieser Kosten eingespart werden.

Quelle: www.deutsche-dekubitusliga.de/das-problem

↓
Doppelter Rückzug =
17cm
mehr Platz im Bett!

3 Bettlängen

ohne Mittellücke > 318 mm und ohne Mittelpfosten


Alle Pflegebetten von wissner-bosserhoff verfügen serienmäßig über eine integrierte Bettverlängerung. Durch die **Express-Bettverlängerung** (s. Abb. unten/Option) lässt sich sentida mit **geteilten Seitensicherungen** flexibel und werkzeuglos für verschiedene Bettlängen anpassen. Dabei werden in jeder Konfiguration die Vorgaben der Norm IEC 60601-2-52 eingehalten.



Bettverlängerung mit Expressauslösung (Option)


200 cm

Bettlänge 200 cm:
Die geteilten Seitensicherungen bieten Schutz ohne Mittellücke > 318 mm* und ohne Protektor

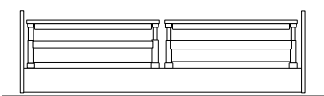


220 cm

Bettverlängerung auf 220 cm:
ist bei sentida mit geteilten Seitensicherungen temporär einstellbar – vollständiger Schutz wird durch fußseitigen Protektor (Zubehör) gewährleistet

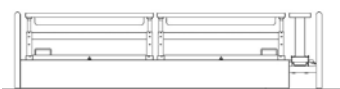

210 cm

Alternative Bettlänge 210 cm:
Schutz mit fußseitig längeren Seitensicherungen ohne Zubehör und ohne Lücke > 318 mm**

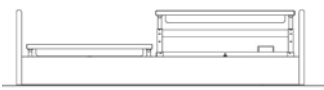

3-Stopp-Strategie

sicher Schlafen, Mobilisieren und Pflegen

Das **IVS = Intelligentes Vertikalisierungs-System** besitzt nicht nur einen großen **Höhenverstellbereich von 27 bis 80 cm**, sondern verfügt darüber hinaus dank intelligenter Steuerung über einen Kollisionsschutz beim Einstellen der Komfortsitzposition. Dies wird insbesondere in Kombination mit der Bettverlängerung auf 220 cm ein unverzichtbarer Vorteil.


27 cm*

Sturzprävention in der Schlafphase




41 cm*

Sichere Mobilisation auf Stuhlhöhe

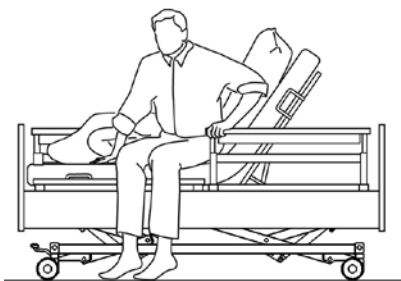

80 cm

Optimale Pflegeposition

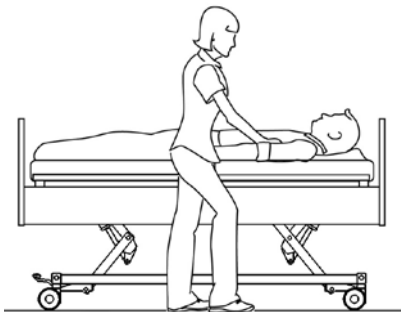

IVS =
Intelligentes
Vertikalisierungs-
System

- Komfortabler Verstellbereich 27-80 cm
- Erster Zwischenstopp zum Bettausstieg auf Stuhlhöhe bei 41 cm
- Kollisionsschutz bei Einstellung der Komfortsitzposition aus der Niedrigposition und bei Verwendung einer Bettverlängerung

SafeFree® – das patentierte Seitensicherungskonzept

Freiheit erhalten ganz im Sinne des Werdenfelser Weges*

4 Seitensicherungen

1

Im heruntergestellten Zustand bieten die geteilten Seitensicherungen neben einer wohnlichen Optik auch einen freien Zugang zum Bewohner für die täglichen Pflege, zum Verbandwechsel oder zum Bettenmachen. Störende Zubehöre wie Mittelpfosten oder fest angebrachte Seitenteile müssen nicht entfernt und verstaut werden.

4-stufiger Auszug

Kein Schutz benötigt



2

Zur Sicherheit bei Nacht genügt es oft, die Niedrigposition des Bettes mit der ersten Auszugsstufe der kopfseitigen Sicherung zu kombinieren. Dieser „Soft-Schutz“ vermeidet unnötige Barrieren und reduziert das Sturzfolgerisiko nachhaltig. Die Seitensicherungen geben Orientierung, ohne den Bewohner einzukengen.

Soft-Schutz

keine FEM*



3

Der 3/4-Schutz ermöglicht eine bewusste Ausstiegslücke am Fußende zur Reduzierung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FEM) bei gleichzeitig hohem Sicherheitsanspruch. Durch Anpassung der Betthöhe in Kombination mit der Höhe der Seitensicherung passt sich sentida jeder Bewohnergröße an.

3/4-Schutz

keine FEM*



4

Die dritte Auszugsstufe dient zur umfassenden Absicherung des Bewohners. In der obersten Position schließen beide Teile der Seitensicherung so eng miteinander ab, dass sie genauso sicher wie ein durchgehendes Seitengitter sind. Die Bevorratung von Zubehören zum Schließen einer Mittellücke bei der Fixierung mit Bauchgurten ist nicht notwendig.

Vollschutz

bei 12-18 cm Matratzen



4 Vorteile

Barrierefreiheit

Kein Pfosten, kein Mittellückenprotektor




Orientierung

statt Freiheitsentziehende Maßnahme (FEM)




Mobilisierung

mit Anpassung an die Bewohnergröße

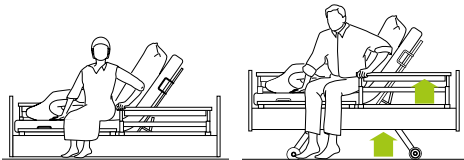

Sicherheit

über die neue Norm IEC 60601-2-52 hinaus

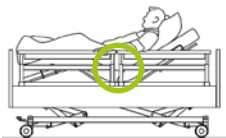


Mobilisierung mit richtigem Abstützwinkel je nach Bewohnergröße




Pflege mit 4 geteilten Seitensicherungen = voller Zugriff

- Flexible Bettverwendung in Nischen bei Standardpflege (Abb. 1)
- Flexibler beidseitiger Zugriff bei erhöhtem Pflegebedarf (Abb. 2)
- Flexible Bettverwendung für links/rechts aussteigende Bewohner zur Mobilisation
- Vermeidung von Folgekosten bei Nachrüstung von geteilten Seitensicherungen

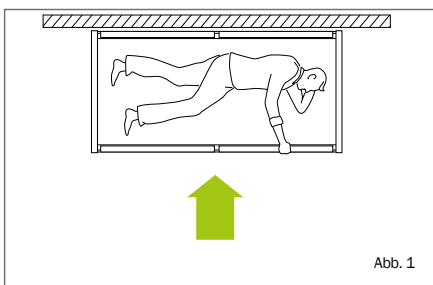

Standardpflege – einseitiger Pflegezugriff ausreichend

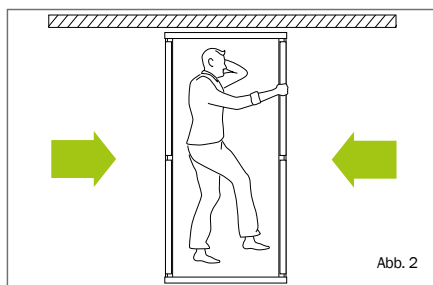


Erhöhter Pflegebedarf – beidseitiger Pflegezugriff notwendig



Mehr Sicherheit durch kleine Mittellücke* < 60 mm

- Bewusste Erfüllung der neuen Norm IEC 60601-2-52
- Sicherheit in Arbeitsposition, d.h. auch mit hochgestellter Rücken- bzw. Beinlehne
- Sicherheit ohne Verwendung eines zusätzlichen Mittellücken-Protektors als Zubehör bei der Fixierung mit Bauchgurten gemäß Empfehlung des BfArM**

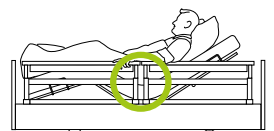


Intelligenter Design-Handschalter


mit erweiterter Funktionalität

Der Handschalter der sentida Pflegebetten be-
steht auf den ersten Blick durch seine Über-
sichtlichkeit und ergonomische Formgebung:
weniger Tasten und große Symbole sorgen
dafür, dass die Bedienung intuitiv erlernbar ist.

Dank der Pre-Selection (Vorauswahlfunktion)
ist der Handschalter erstfehlersicher – eine
Funktionsauslösung durch versehentliches
Drücken einer Taste ist ausgeschlossen.

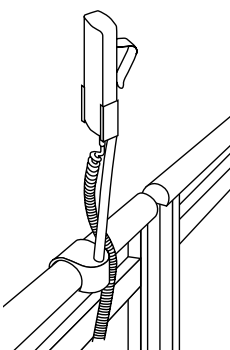

Jederzeit gute Erreichbarkeit für Bewohner
und Personal (Zubehör Handschalterhalter,
Mod. 10-0419 und 10-0421).

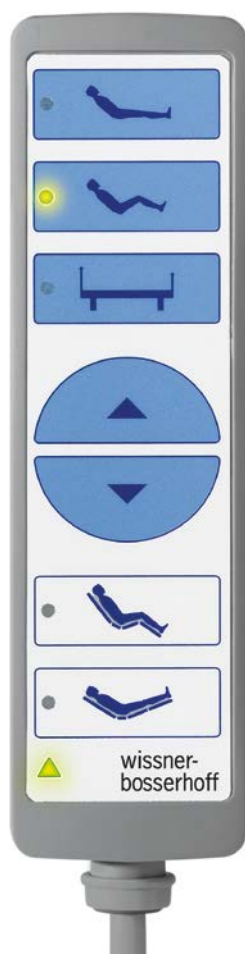

- Rückenlehnen-
verstellung
- Autokontur
- Höhenverstellung
- Auf
- Ab
- Komfortsitz-Automatik
- Prophylaxe-Automatik

**Erweiterte
Funktionen**

- Nachlichtsteuerung
- Separate Beinlehen-
verstellung
- Mobilisierungsfunktion
- Spielschutz

3 Sicherheitsstufen

In den Handschalter integriert ist die Sperr-
funktion auf seiner Rückseite, ein Suchen und
Bücken nach einer am Liegeflächenholm ange-
brachten Sperrbox entfällt somit.

Über einen magnetfreien Schlüssel werden drei
Handschaltermodi eingestellt, durch die die
Bedienungsmöglichkeiten des Bettes je nach
Pflegesituation angepasst werden können:
Im **Sperrmodus** sind alle Funktionen des Hand-
schalters gesperrt.
Im **Bewohnermodus** stehen die oberen drei Aus-
wahltasten dem Bewohner zur Verfügung.
Der **Pflegemodus** gibt alle Auswahltasten frei.



- Pflegemodus
- Sperrmodus
- Bewohnermodus



Schlüssel für Sicherheits-
stufen (magnetfrei)

2 Automatik-Positionen

Die mit einem Tastendruck einstellbaren Automatikpositionen des sentida unterstützen den Lage-
rungskomfort und die Dekubitusprävention – zum Wohle des Bewohners und zur Entlastung des
Pflegepersonals.


Komfortsitz-Automatik

Die Komfortsitz-Automatik fährt das Bett in die
voreingestellte Sitzposition: zum gemütlichen
Fernsehen und Lesen, zum Essen oder zur
Kommunikation auf Augenhöhe. Eine Mobi-
lisation mit dem Lifter wird in dieser Position
wirksam unterstützt. Darüber hinaus erleich-
tert diese Position die Atmung sowie die Ver-
dauung, bei bettlägerigen Bewohnern werden
die räumliche Wahrnehmung trainiert und der
Kreislauf stimuliert. Durch den doppelten Rück-
zug wird zusätzlich eine Druckentlastung im
Sakralbereich erreicht.



Lagerungs-Automatik

Die voreingestellte Beinhochlage unterstützt
die Entstauung bei Venenerkrankungen und
begünstigt gleichzeitig die Dekubitusprävention.
Die 1/2 Fowler-30°-Lagerung mit Knieerhöhung
gewährleistet ein geringeres Dekubitusrisiko*
durch die vorteilhafte Gewichtsverlagerung in der
besonders gefährdeten Kreuzbeinzone.

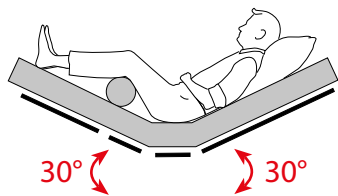

wissner-bosserhoff - ihr verllässlicher Partner bei der Vermeidung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FEM): Mit SafeSense® präsentiert wissner-bosserhoff ein Assistenzsystem mit intelligenter Sensorik, das Tag und Nacht zuverlässig bei der Reduzierung von FEM unterstützt. Es ist mit einer Nachlicht-Automatik ausgestattet, die beim Bettausstieg aktiviert wird und erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt. SafeSense® ist kompatibel mit marktüblichen Schwesternrufsystemen und nach- bzw. aufrüstbar für wissner-bosserhoff Pflegebetten ab 2002.



Mehr Sicherheit – weniger FEM**

- Schnellere Reaktionszeit bei Stürzen
- Höheres Sicherheitsniveau bei Nacht- und Wochenendschichten
- Ideal in Kombination mit sentida Niedrigpflegebetten und SafeFree®-Seitensicherung

Nightlight-Automatik

- Nachlicht wird automatisch beim Bettausstieg aktiviert
- Nachlicht erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt



Individuelle Alarmierung

- Von 0 Sek. Sofortalarm bis 30 Min. flexibel und stufenlos einstellbar
- Anpassung an die Mobilität des Bewohners



Integriert oder als Nachrüst-Kit

- Zubehör-Option für aktuelle WIBO-Pflegebetten
- Nachrüst-Kit für elektrische WIBO-Pflegebetten ab 2002
- Als Funk- oder Kabellösung erhältlich

Weitere Informationen zum SafeSense® finden Sie auf Seite 30.



Effektives Kabelmanagement


D-Box versorgt Bett und Leseleuchte

Die praktische D-Box macht dem lästigen Kabelgewirr ein Ende. Innen am Kopfteil angebracht nimmt die D-Box die beiden Kabel des Bettes und der Leuchte auf. Somit führt nur noch ein Kabel zur Steckdose.

3 Kabel – eine Lösung – viele Vorteile

- Es muss nur ein Kabel entfernt werden, wenn das Bett bewegt wird.
- Keine Verwechslungsgefahr bzgl. des Kabels beim Herausziehen aus der Steckdose.
- Unabhängig vom Motor, daher guter Zugang zu den Anschlüssen in jeder Bettposition.
- Einsetzbar für Halogen- und LED-Leuchten.

Halogen
+
LED

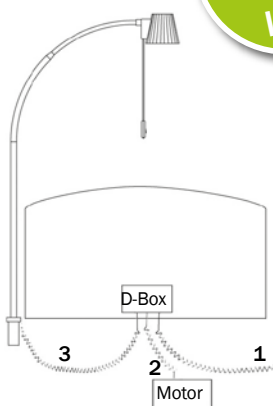

Antimikrobielle Beschichtung

Keimfreie* Oberflächen in kürzester Zeit

In Pflegeeinrichtungen ist ein erhöhtes Aufkommen von MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) und anderen Erregern beobachtbar, die durch gängige Hygienemaßnahmen kaum oder nur sehr aufwändig verhindert bzw. vernichtet werden können.

wissner-bosserhoff bietet daher nun erstmalig in Europa eine antimikrobielle Beschichtung für Pflegebetten an. Die im Pflegealltag durch Bewohner und Pflegepersonal am häufigsten berührten Bettpartien werden durch die Beschichtung imprägniert, was effektiv ein Entstehen und die Weiterverbreitung der multiresistenten Viren verhindert. Für den Menschen unbedenklich, werden kontinuierlich Ionen gebildet, die die Stoffwechselsysteme der schädlichen Mikroorganismen angreifen.

Den Praxistest hat die antimikrobielle Beschichtung erfolgreich bestanden: Der Wirkstoff auf ionischer Basis ist hochwirksam gegen Bakterien, Viren, Pilze und Algen. Selbst wenn zusätzlich marktübliche Desinfektionsmittel eingesetzt werden wird die Wirkung nicht beeinträchtigt.



Die wibo-Wirkformel

Der antimikrobielle Schutzfilm wirkt nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Viren (z. B. HIV, Grippe usw.), Pilze (z. B. Schwarzschilder) und Algen. Er ist also viel effizienter als normale Wischdesinfektionen und behält seine volle Wirksamkeit über den Produktlebenszyklus hinaus.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Ansiedlung und Übertragung von Keimen wird reduziert
- Reduzierung der Ansteckungsgefahr durch gehemmtes Keimwachstum
- Zahl der Infektionen in Pflegeheimen wird gesenkt
- Antibiotika-Resistenzen werden reduziert
- Risiko der Beschädigung durch Reinigungsmittel verringert sich

Eine dauerhafte Keimansammlung und -vermehrung auf den am häufigsten berührten Pflegebett- und Nachttischoberflächen wird damit wirksam verhindert.

MRSA sind die häufigsten multiresistenten Erreger nosokomialer Infektionen in Europa. Schätzungen zeigen, dass jährlich etwa

170.000

MRSA-Infektionen die europäischen Gesundheitssysteme mit mehr als

5.000

Todesfällen, mehr als einer Million zusätzlichen Hospitalisationstagen und Mehrkosten von circa 380 Millionen Euro belasten.

Quelle: <http://www.aerzteblatt.de/archiv/112574/Methicillin-resistenter-Staphylococcus-aureus-in-Deutschland-Epidemiologie>

Studien zur Wirksamkeit des antimikrobiellen Additivs in den Materialien der Pflegebetten und -nachttische zeigen, dass es im Durchschnitt 99,9 % der E.coli- und Micrococcus luteus-Bakterien sowie 98,4 % der Staphylococcus aureus-Bakterien innerhalb von

180 Minuten

eliminiert.

Quelle: Studien der SteriOne GmbH & Co. KG, Berlin



memoriana

sentida im Raumkonzept für Demenzerkrankte

Die adäquate Betreuung von Demenzkranken ist eine besondere Herausforderung für Pflege und Angehörige. wissner-bosserhoff hat in Kooperation mit Demenzexperten in Großbritannien und Deutschland ein Raumkonzept für Demenzerkrankte entwickelt. Speziell auf die Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtet, bietet das neue Konzept eine wesentliche Entlastung in der Betreuung. Im Fokus der Entwicklung stehen drei Zielsetzungen für die Betreuung von dementen Bewohnern:



Orientierung verbessern

Dem Bewohner werden zeitliche, farbliche und räumliche Orientierungspunkte geboten. Die gezielte Integration von Farben, Formen und Gegenständen hilft bei der räumlichen Wahrnehmung - Ängste und Frustrationen werden abgebaut.



Selbstständigkeit erhöhen

Je selbstständiger der Bewohner sich in seinem Umfeld bewegen kann, umso stärker wird auch das Pflegepersonal entlastet. Funktionale Einrichtungselemente wie Handläufe und offene Ablageflächen fördern die Mobilität und Eigenständigkeit der Demenzerkrankten. Andere Bereiche im Zimmer sind dagegen nur für die Betreuer zugänglich.



Sicherheit maximieren

Die Sicherheit der Bewohner ist ein zentraler Aspekt. Niedrige Pflegebetten mit Seitensicherung, Handläufe an Mobiliar und Wänden sowie die visuellen Orientierungshilfen bieten dem Demenzerkrankten ein Maximum an Sicherheit ohne fühlbare Einschränkungen.

100

verschiedene
Ursachen

Demenz kann bis zu 100 verschiedene Ursachen haben. Ebenso komplex wie Ursachen und Auslöser ist auch der Verlauf, der von Betroffenen zu Betroffenen ganz verschieden sein kann.

Quelle: www.bmg.bund.de
Bundesministerium für Gesundheit



Nähere Informationen zum Raumkonzept für Demenz erhalten Sie in der separaten memoriana Broschüre oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@wi-bo.de



Design | Kopf-/Fußteile



Design A
Kopf-/Fußteil



Design Ak
Kopf-/Fußteil



Design Ak
abgeklappt



Design D
Kopfteil



Design D
Fußteil



Design D
flaches Fußteil (Dx)



Design G
Kopfteil



Design G
Fußteil



Design G
flaches Fußteil (Gx)



Design K
Kopfteil



Design K
Fußteil



Design K
flaches Fußteil (Kx)



Design S
Kopfteil



Design S
Fußteil



Design S
flaches Fußteil (Sx)



Design T
Kopfteil



Design T
Fußteil



Design T
flaches Fußteil (Tx)



Design W
Kopfteil



Design W
Fußteil



Design W
flaches Fußteil (Wx)



Design DR
Kopfteil



Design DR
Fußteil



Design LP
Kopf- und Fußteil

Farben | Dekore*




Ahorn (R 5184)



Buche natur (R 5320)



Buche gedämpft (F 37/009)

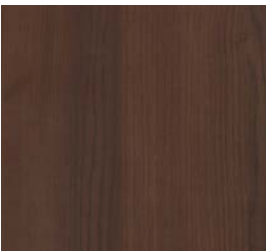


Cacao (R 5447)



Erle goldrot (R 4601)



Kirsche (R 5360)

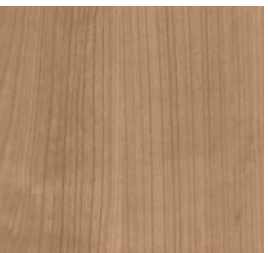


Kirsche Havanna (R 5681)



Lindberg Eiche (R 4223)



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Nussbaum (R 4801)



Vulkanweiß (U 1011)


Farbkombination memoriana**

Kombinationsmöglichkeit 1



Korpus Ahorn (R 5184)
Umrandung Kirsche Havanna
(R 5681)


Kombinationsmöglichkeit 2

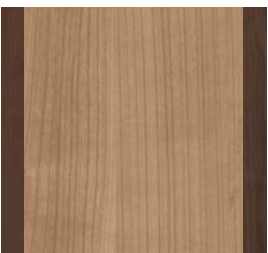


Korpus Kirsche Havanna (R 5681)
Umrandung Cacao (R 5447)

Ausstattungen und Zubehör

Maße

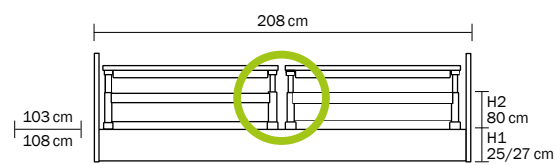


sentida mit geteilten Seitensicherungen (10er), lückenlos
Außenmaß: L = 208 cm, B = 103/108 cm
Matratzenmaß: L = 200 cm, B = 87 cm
H1 25/27 cm (Niedrigposition), H2 80 cm (Höchstposition)

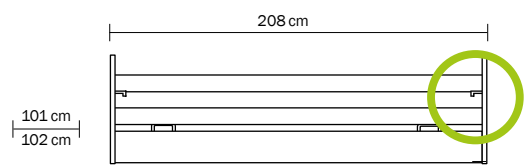


sentida mit durchgehender 2-fach
Seitensicherung 09 mit Pistolenauslösung


Liegeflächen

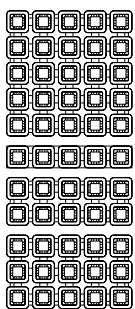

Komfort

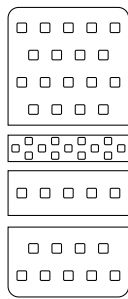


EasyClean

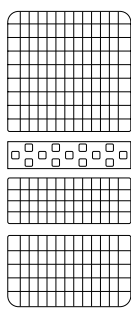


Standard | Aero


Bettverlängerungen

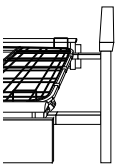


Temporäre Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Standard)

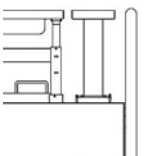


Permanente Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Option)

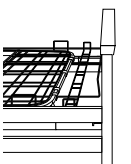

Permanente Bettverlängerung 09er Seitensicherung (Option)

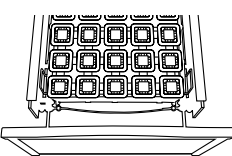


Bettverlängerung mit Expressauslösung (Option)

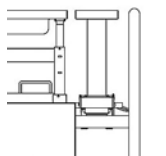

10-0570 / 10-0580
Protektor für Bettverlängerung um 20 cm (Option)


Optionen

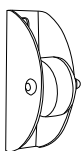


Vertikale Wandabweissenrollen



3D-Wandabweissenrollen horizontal und vertikal wirkend

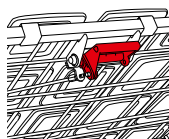


Auslösung CPR an der Rückenlehne

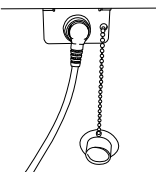


Plug + Play zur Nutzung des Handschalters an einer oder beiden Bettseiten




D-Box mit Leuchtenanschluss für optimales Kabelmanagement

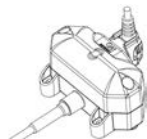


Unterbettleuchte (schaltbar)

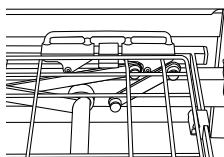


10-0563/10-0533/10-0521
Segufixhalterung
- für Oberschenkellehne
- für die Rückenlehne
- für das Sitzteil

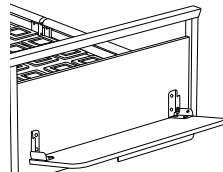

10-0719
Bettzeugablage, kompatibel mit allen Betten

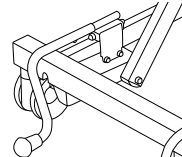


10-0707
kopfseitiger Wandabstandshalter kurz (nur sentida 5 + 6)

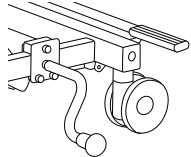


10-0708
seitlicher Wandabstandshalter kurz (nur sentida 5 + 6)


Zubehör

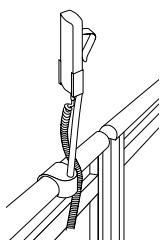


10-0419
Handschalterhalter für geteilte Seitensicherungen
10-0421
Handschalterhalter, kurz

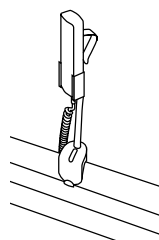


10-0422
Zubehör- und Handschalterhalter für durchgehende Seitensicherungen
10-0421
Handschalterhalter, kurz

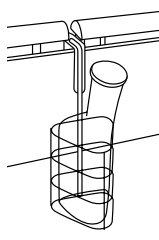


10-0424
Zubehör- und Handschalterhalter zur Anbringung an der Seitenwange
50-0165 Urinflaschenkorb
50-0164 Urinbeutelhalter (ohne Abb.)

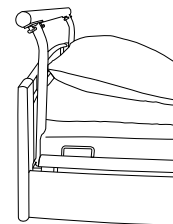

10-0534
Transportgriff EasyMove

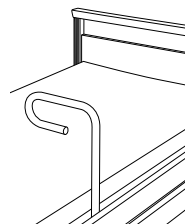


10-0715
Aufstehhilfe für 09-er und 10-er Seitensicherungen, sowie ¾ Seitensicherungen

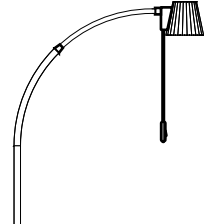


50-0212 Design Halogenleuchte soluna mit 12-V-Trafo
50-0213 Design Halogenleuchte soluna ohne 12-V-Trafo
50-0237 Design LED Leuchte soluna mit Steckernetzteil
50-0550 Design LED Leuchte soluna ohne Steckernetzteil



50-0206
Sturzmatte B 90 x L 200 cm, Höhe ca. 4,5 cm

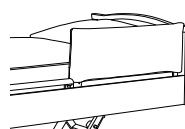


50-0174
Polster für geteilte 10'er Seitensicherungen

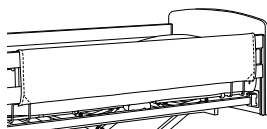

50-0338
Polster für 09'er 2-fach Seitensicherungen


Zubehör | SafeSense® Bed-Exit-System

SafeSense® Sensormatte

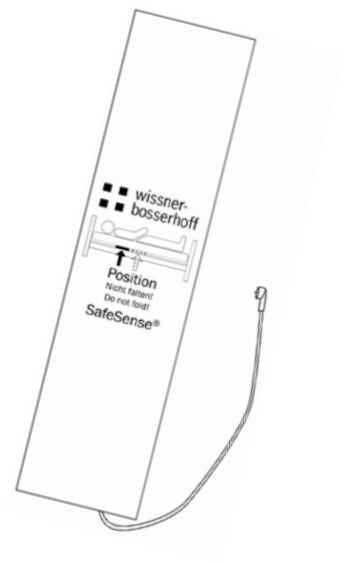

02-000713
SafeSense® Sensormatte
80 x 20 cm


SafeSense® Bed-Exit-Box

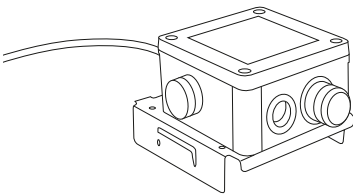

Kabellösung (SafeSense® 1):
04-1544-001
Bed-Exit-Box, für Bett ohne Akku
04-1544-004
Bed-Exit-Box, für Bett mit Akku

Funklösung (SafeSense® 2):
04-1544-002
Bed-Exit-Box, für Bett ohne Akku
04-1544-003
Bed-Exit-Box, für Bett mit Akku


SafeSense® Anschluss-Kit

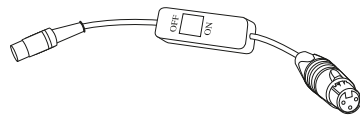

04-1508
Adapterkabel mit Ein-/Ausschalter und
passendem Stecker für den Anschluss an
die Rufanlage (kundenspezifisch) für Kabel-
und Funklösung (SafeSense® 1 und 2)



04-1608
Adapterkabel ohne Ein-/Ausschalter;
mit passendem Stecker für den Anschluss
an die Rufanlage (kundenspezifisch)
für Kabel- und Funklösung

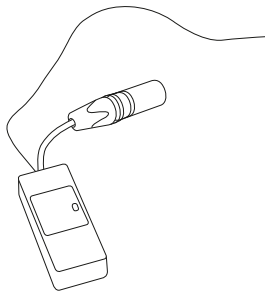

02-000726
Funkempfänger
nur für Funklösung
(SafeSense® 2)

Unsere Zertifikate – Ihre Sicherheit

Freiwillig lässt wissner-bosserhoff seine Fertigungsprozesse und das Management regelmäßig vom TÜV auditieren. Das Unternehmen ist zertifiziert nach den Bestimmungen der DIN EN ISO 9001:2008 für Qualitätsmanagement-Systeme sowie DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 für die Herstellung von Medizinprodukten.



ISO 9001 ISO 13485 ISO 14001:2004 Umweltschutz-Zertifikat CB-Zertifikat Gutachten zu Seitensicherungen Prüfzeugnis zur antimikrobiellen Beschichtung



Prüfsiegel für Produkt-Zertifizierung und Auditierung



Ausgezeichnetes Design

wissner-bosserhoff widmet dem Design große Aufmerksamkeit. Die Produkte verbindet nicht nur Funktionalität und hochwertige Ausführung, sondern auch Design auf höchstem Niveau. Sie zeichnen sich sowohl durch hohe Funktionalität und wohnliche Gestaltung als auch durch angenehme Bedienbarkeit und Ergonomie aus. Dafür hat sentida mehrfach angesehene Design-Auszeichnungen erhalten und zählt damit zu den bedeutendsten Pflegebettserien im internationalen Maßstab.





Member of LINET Group

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | D-58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49(0)2377/784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | www.wi-bo.de

